

**ISO 9001**  
REGISTERED FIRM

## SPITALUL ORĂȘENESC Buhuși

Buhuși-605100, str. Văioagă nr.3, jud. Bacău Nr. A. S. F. 699/05. 10. 2015 ; C.I.F. 4187271

Certificat I.S.O. 9001.:Numar certificat 56336/A0001/UK/RO

Tel: 0234-262220 – centrala; Tel/Fax: 0234-261560 – secretariat;

e-mail: spitalbuhusi@gmail.com ; www.spitalbuhusi.ro

Nr...9844.....din...17.11.2015

Elaborat:As.med.pr.Ciobanu Laura Data:14.11.2015	Semnatura
Verificat:Medic coord.comp. Dr.Toron Mouhannad Semnatura	
Verificat pentru conformitate: Birou calitate Data:	CONSTANTIN POIANA MANAGER DE CALITATE
Aprobat: Manager Dr.Toron Mouhannad Data:	Semnatura
Diseminare: Catre Compartimentul Chirurgie	
Aplicare: Procedura se aplica de catre toti asistentii medicalii al S.O.B. care isi desfaroara activitatea pe ramura chirurgicala.	

Editia\Revizia	Componenta revizuita	Descrierea modificarii	Data la care se aplica prevederile editiei\reviziei
Editia 1			20.02.2014
Revizia 1	x	Adaugare antet,tabel revizii,tabel (elaborat,verificat,aprobat, diseminare,aplicare)	18.11.2015
Revizia 2			
Revizia 3			

### PROCEDURA PRIVIND PREGATIREA INSTRUMENTARULUI IN VEDEREA STERILIZARII

#### SCOP

Evitarea contaminarii personalului

Reducere contaminarii mediului de spital

Evitare fixarii pe instrumentar a materiei organice(sange,secretii,alte fluide)prin uscare


Pentru realizarea scopului propus,decontaminarea ,se va face imediat dupa utilizarea instrumentarului

#### DEFINITIE

SPITALUL ORĂȘENESC Buhuși



BIROUL DE CALITATE

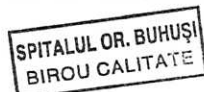

Decontaminarea si curatarea instrumentarului utilizat in vederea sterilizarii

## DOCUMENTE DE REFERINTA

Ordinul MS nr 972\2010 privind aprobarea standardelor de acreditare

## DESCRIEREA PROCEDURII

**Pregatirea** se realizeaza **imediat dupa utilizarea instrumentarului** (se previne astfel uscarea produselor biologice) si se face **cat mai aproape de locul utilizarii**

Instrumentarul folosit, fara alte manevrari, **se imerseaza complet** in solutie de **detergent-dezinfectant** =. Surfanios Citron 20ml in 8 litri apa(se eticheteaza recipientul cu data ,ora si persoana care a preparat solutia)

-dupa respectarea timpului minim de contact,(conform datelor producatorului) **se spala bine** cu **periuta de nailon pentru instrumentar(folosita doar in acest scop)**,insistandu-se la dintii si zimtii penselor, articulatiile si canelele instrumentelor !

-se **clateste riguros instrumentarul curatat** la jet de apa abundent !

**Instrumentarul curatat** se introduce intr-un **recipient cu capac** ce contine **solutie dezinfectanta** (ex. Glutex sau Korsolex )

-se **eticheteaza** recipientul cu data inceperii folosirii solutiei- fiind valabila 30 de zile (daca solutia este curata fara urme de substante organice),in caz contrar se schimba.

-se **imerseaza complet** instrumentarul in solutie .Dupa respectarea timpului minim de contact(20 min), instrumentarul **se clateste riguros din nou** la jet de apa abundent!

Se procedeaza apoi la **uscarea instrumentarului** cu un prosop de hartie sau laveta de unica folosinta.

**Se verifica integritatea** instrumentelor.

**Se aseaza** instrumentarul in cutii care vor fi pulverizate in prealabil cu dezinfectant (Isorapid spray)si sterse cu o laveta de unica folosinta sau prosop de hartie

Se transporta cu ajutorul caruciorului catre Compartimentul de Sterilizare, cu respectarea orelor de circuit al instrumentarului.

**!!! Personalul care efectueaza toate aceste operatiuni, va respecta Precautiunile**

**Universale** (echipament de protectie adecvat:manusi,masca cu ochelari ,halat sau sort de unica folosinta)



SPITALUL ORĂȘĂNESC Buhuși





**ISO 9001**  
REGISTERED FIRM

## SPITALUL ORĂȘENESC BUHUȘI

Buhuși-605100, str. Văioagă nr.3, jud. Bacău Nr. A. S. F. 699/05. 10. 2015 ; C.I.F. 4187271

Certificat I.S.O. 9001:..Numar certificat 56336/A0001/UK/RO

Tel: 0234-262220 – centrala; Tel/Fax: 0234-261560 – secretariat;

e-mail: spitalbuhusi@gmail.com ; www.spitalbuhusi.ro

Distribuire documentatie. Fisa protocolului/ procedurii... **PROCEDURA PRU/HD PREGATIREA INSTRUMENTARULUI IN UEDENGA - STERILIZARE**

	Exemplarul 0 se gaseste la.	Data difuzarii	Numarul ex, difuzat	Sectia/ compartimentul unde a fost difuzat	Cine a primit exemplarul.	Cod/ nr inregistrare procedura / protocol.
1	PATROU CALITATE	15.XI.2016	1	COMP. CHIRURGIA	AS. SCOPU	9345
2			2	BUOC OPERATOR	AS. POIANA	
3			3	COMP. INT. DEZ	AS. BUCULE	
4			4	CAB. AMB. CHIRURGIA	AS. CAUTISANU	
5			5	CAB. AMB. O.G.	AS. TIRON 'M	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						

PROCEDURA PRIVIND

Tabel luare la cunostinta/ instruire personal pentru protocolul/procedura  
~~PROSEDURA INSTRUMENTARULUI IN VEACINA STERILIZARII~~  
 data instruirii..... 19.XI.2015.....cine a instruit..... As. ICHOPU M. - acord

	Nume / prenume	Funcția.	Semnatura.
1	LAZAROIU ANCA	as. med. pr.	
2	SBARCEA LEHUTA	as. med. pr.	
3	SPATANU HUCOLETA	as. med. pr.	
4	CIOBANU LAURA	as. med. pr.	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Data la care urmeaza sa fie efectuata testarea..... 19.XI.2015.....

Tabel testare personal.

Data testarii..... 18.XI.2015.....cine a efectuat testarea..... As. ICHOPU M. - acord

	Nume / prenume	B.	S.	Ns.	Semnatura
1	LAZAROIU ANCA	1			
2	SBARCEA LEHUTA	1			
3	SPATANU HUCOLETA	1			
4	CIOBANU LAURA	1			
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					