



**ISO 9001**  
REGISTERED FIRM

## SPITALUL ORĂȘENESC BUHUȘI

Buhuși-605100, str. Văioagă nr.3, jud. Bacău Nr. Autoriz. funcț.: 102/01. 09. 2010 ; C.I.F. 4187271  
Certificat I.S.O. 9001:..Numar certificat 56336/A0001/UK/RO  
Tel: 0234-262220 – centrala; Tel/Fax: 0234-261560 – secretariat;  
e-mail: spitalbuhusi@gmail.com ; www.spitalbuhusi.ro

Nr. 8676 din 7-10.2015

COMPARTIMENT STERILIZARE

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Elaborat.</b> As. med. Pr. Pascu Adina Gabriela  | <b>Semnatura.</b> |
| <b>Data.</b> 26.09.2015   |                   |
| <b>Verificat.</b> Dir. Medical Dr. Rotaru Hilda   | <b>Semnatura.</b> |
| <b>Data.</b>  |                   |
| <b>Verificat pentru conformitate.</b> Birou calitate. M.C. Poiana Constantin                                | <b>Semnatura.</b> |
| <b>Data.</b>  |                   |
| <b>Aprobat.</b> Manager. Dr. Toron Mohannad   |                   |
| <b>Diseminare.</b><br>Catre Compartimentul Sterilizare  |                   |
| <b>Aplicare.</b><br>Procedura este aplicata de asistentele medicale din cadrul Compartimentului Sterilizare |                   |



CONSTANTIN POIANĂ  
MANAGER  
DE CALITATE

| Editia/<br>Revizia | Componenta<br>revizuita | Descrierea modificarii | Data de la care se<br>aplica prevederile<br>editiei/reviziei |
|--------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Editia I           | ✗                       |                        | 07.10.2015   |
| Revizia 1          |                         |                        |  |
| Revizia 2          |                         |                        |  |
| Revizia 3          |                         |                        |  |

### PROCEDURA DE UTILIZARE A BENZII INDICATOARE PENTRU AUTOCLAV

#### SCOP

Controlul sterilizarii cu abur.

#### DEFINITIE

Banda indicatoare pentru autoclav VP. Stericlin prezinta urmatoarele.



SPITALUL OR. BUHUȘI  
BIROU CALITATE

## CARACTERISTICI: STANDARD ISO.11140 part 1 clasa 1

- Culoare: bej;
- Dimensiuni rola: 19mm x 50mm; grosime 0,17mm;
- Adeziv rezistent la temperatura si umiditate;
- Linii indicatoare pentru controlul sterilizarii cu abur.

## DOCUMENTE DE REFERINTA

Fisa tehnica a producatorului.

## DESCRIEREA PROCEDURII

### Mod de utilizare

Pentru indicarea procesului de sterilizare se foloseste aproximativ 10cm de banda;

Culoarea se schimba din Verde in Maro inchis;

Schimbarea culorii se face rapid in functie de timpul de expunere:

- 10 minute pentru o temperatura de 121°C;
- 2 minute pentru o temperatura de 134°C;

Odata folosita pentru un proces de sterilizare, banda nu mai poate fi re folosita pentru o a doua sterilizare.

### ATENTIE!

In cazul in care schimbarea culorii este incompleta unii sau toti parametri de sterilizare nu au fost atinsi.

NU folositi respectiva sarja ca si „sterila” controlati sterilizatorul.

## CONDITII DE DEPOZITARE:

Temperatura optima de depozitare a benzilor pentru autoclave este cuprinsa intre 15-25°C si o umiditate de 40-60%; protejati impotriva lumina UV.

Termen de valabilitate: conform certificatului furnizat.

## RESPONSABILITATI

Responsabil asistentul medical din cadrul Compartimentului Sterilizare.



Biroul de calitate.

