




ISO 9001
REGISTERED FIRM

SPITALUL ORĂȘENESC BUHUȘI

Buhuși-605100, str. Văioagă nr.3, jud. Bacău Nr. Autoriz. funcț.: 102/01. 09. 2010 ; C.I.F. 4187271
 Certificat I.S.O. 9001:..Numar certificat 56336/A0001/UK/RO
 Tel: 0234-262220 – centrala; Tel/Fax: 0234-261560 – secretariat;
 e-mail: spitalbuhusi@gmail.com ; www.spitalbuhusi.ro

Nr. 7719 din 7.09.2015.

Elaborat. As med pr . Mares Mariana	
Data. 07.09.2015	Semnatura.
Verificat. Dir. Medical . Dr. Rotaru Hilda	
Data. 08.09.2015	Semnatura.
Verificat pentru conformitate. Birou calitate. M. C. Poiana Constantin	
Data. 08.09.2015	Semnatura.
Aprobat. Manager. Dr. Toron Mouhannad.	
Data. 08.09.2015	Semnatura.
Diseminare. Catre Compartimentul Sterilizare	
Aplicare. Procedura se aplica de asistentele medicale din cadrul Compartimentului Sterilizare	

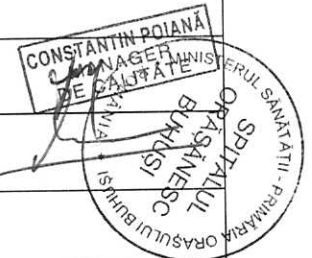

Editia/ Revizia	Componenta revizuită	Descrierea modificarii	Data de la care se aplică prevederile ediției / reviziei
Ediția I			16.04.2014
Revizia 1		Adaugare tabel revizii, adaugare tabel elaborat , verificat , aprobare , aplicare , diseminare , adaugare asumare continut , adaugare verificare director medical la etapele pentru validare	07.09.2015
Revizia 2			
Revizia 3			



Spitalul Orasenesc Buhuși

Biroul de calitate.

PROCEDURA DE UTILIZARE A DISPOZITIVULUI DE SIGILARE PENTRU PUNGILE DE STERILIZARE

Scop:

Taierea si sigilarea pungilor de sterilizare utilizate in efectuarea actului medical in cadrul Spitalului Orasenesc Buhusi

Definitii .

Dispozitivul manual SEAL 100 este un aparat care taie si sigileaza foliile folosite pentru sterilizarea materialelor in autoclave .

Documente de referinta.

Cartea tehnica de functionare si exploatare a dispozitivului manual SEAL 100 .

Descrierea procedurii.

Dispozitivul manual SEAL 100 se va aseza pe o suprafata plana , in pozitie verticala . Se va introduce stecherul in priza si se porneste comutatorul de alimentare . Preincalzirea dureaza doua minute . Aparatul SEAL 100 are un sistem de control al temperaturii prin rotirea butonului de reglare .

Rola cu punga pentru sterilizat se aseaza pe suport si folia se trage si se plaseaza intre bare cu fata de hartie in jos , dupa care se apasa manivela cu presiune minim 4 secunde pentru lipire . Pentru taiere se folosesc caterul inainte si inapoi . Dupa sigilarea pungii , se ridica manivela si se scoate folia de pe platforma de lucru .

Precautii :

ATENTIE la cablul de alimentare - trebuie scos din priza dupa folosirea aparatului !

Pentru a evita arderea sau ranirea personalului trebuie lasata bara de etansare sa se raceasca inaintea inceperii altei operatii .

Aparatul se foloseste pe o suprafata de lucru libera , plana si in pozitie verticala .

NU se aseaza in apropiere apa !!


Pentru o buna sigilare a pungilor nu se depaseste temperatura de la nivelul 4 la butonul de reglare .

Responsabilitati.

Personalul medical care lucreaza in Compartimentul Sterilizare

Anexe inscristuri. - Nu este cazul

Spitalul Orasenesc Buhusi.

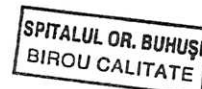

Biroul de calitate.