



ISO 9001
REGISTERED FIRM

SPITALUL ORĂȘENESC BUHUȘI

Buhuși-605100, str. Văioagă nr.3, jud. Bacău Nr. Autoriz. funcț.: 102/01. 09. 2010 ; C.I.F. 4187271
Certificat I.S.O. 9001: Numar certificat 56336/A0001/UK/RO
Tel: 0234-262220 – centrala; Tel/Fax: 0234-261560 – secretariat;
e-mail: spitalbuhusi@gmail.com ; www.spitalbuhusi.ro

Nr. 8647 din 7-10-2015

COMPARTIMENT STERILIZARE

Elaborat. As. med. Pr. Pascu Adina Gabriela	Semnatura.
Data. 25.09.2015	
Verificat. Dir. Medical Dr. Rotaru Hilda	Semnatura.
Data.	
Verificat pentru conformitate. Birou calitate. M.C. Poiana Constantin	Semnatura.
Data.	
Aprobat. Manager. Dr. Toron Mohannad	
Diseminare. Catre Compartimentul Sterilizare	
Aplicare. Procedura este aplicata de asistentele medicale din cadrul Compartimentului Sterilizare	



CONSTANTIN POIANĂ
MANAGER
DE CALITATE

Editia/ Revizia	Componenta revizuita	Descrierea modificarii	Data de la care se aplica prevederile editiei/reviziei
Editia I	X		07.10.2015
Revizia 1			
Revizia 2			
Revizia 3			

PROCEDURA DE UTILIZARE A ROLELOR SI PUNGILOR PENTRU STERILIZARE

SCOP

Sterilizarea materialelor sanitare folosite in actul medical



SPITALUL OR. BUHUȘI
BIROU CALITATE

DEFINITIE

Rolele si pungile pentru sterilizare PMS.Steripack sunt fabricate din film copolimer al PET./PP si hartie kraft de uz medical.

Un indicator de proces este aplicat pe suprafata rolei si pungii.

Indicatorul arata metoda de sterilizare.

DOCUMENTE DE REFERINTA

Fisa tehnica a producatorului

DESCRIEREA PROCEDURII

Mod de utilizare

1. Pungile PMS. Sterilepack pot si utilizate imediat. Rolele PMS. Steripack trebuie taiate la lungimea ceruta si lipite la unul dintre capetele astfel incat sa formeze o punga.
 2. A nu se utiliza daca ambalajul este deteriorat. A nu se reutiliza.
 3. Acoperiti capatul ascutit al instrumentelor cu un protector pentru instrumente pentru a evita taierea sau inteparea rolei/pungii.
 4. Introduceti produsul care trebuie sterilizat in punga. Nu umpleti pungile la mai mult de 75% din capacitatea lor.
 5. Lasati intotdeauna o distanta de 1,5 cm intre obiect si fiecare capat sigilat al pungii.
 6. Manual indepartati din punga cat mai mult aer posibil inainte de lipire. Lipiti punga cu ajutorul unei masini de lipit speciale si corect calibrate in conformitate cu recomandarile producatorului. Intensitatea lipiturii trebuie facuta astfel incat sa asigure o dezlipire curata.
 7. Evitati sa fortati lipitura in timpul manevrarii pungii, de exemplu umpleti punga in pozitie orizontala, lucrând pe o suprafata dreapta.
 8. Atunci cand le incarcati in sterilizator, asezati pungile in container astfel incat filmul (partea transparenta) sa fie asezat peste alt film iar hartia peste alta hartie.
 9. Pungile de sterilizare trebuie asezate in pozitie verticala in casoleta sau container si nu prea inghesuite, astfel incat sa puteti introduce mana printre ele.
 10. Efectuati incadrarea in conformitate cu procedurile standard.
 11. Manuiti cu atentie pungile atunci cand le scoateti din Sterilizator pentru a evita ruperea lor. Depozitati pungile intr-o zona ferita de lumina soarelui, apa sau alte lichide.
 12. Nu utilizati pungi ude. Repetati procesul de Sterilizare dupa ce ati schimbat punga.
 13. Pentru a desface punga, utilizati degetul mare si aratatorul de la o mana pentru a tine partea din plasic a pungii si degetul mare si aratatorul de la cealalta mana pentru a trage de partea din hartie a pungii. Intotdeauna desfaceti punga in semnsul indicat de sageata. Pentru o deschidere curata desfaceti punga incet.
- Depozitati la temperatura max +35°C max 70% umiditate in aer. Rolele de Sterilizare au un termen de depozitare e 5 ani in conditiile respectarii indicatiilor mai dus mentionate.
- Pungile sterilizate sau nu, trebuie ferite de umezeala, curenti de aer puternici, lumina directa a

Spitalul Orășnesc Buhusi.



Biroul de calitate.



soarelui. Dacă hărtia pungii a apucat să fie udă, punga nu mai trebuie utilizată sub niciun motiv.

RESPONSABILITATI

Responsabil asistentul medical din cadrul Compartimentului Sterilizare.



Biroul de calitate.

