



ISO 9001
REGISTERED FIRM

SPITALUL ORĂȘENESC BUHUȘI

Buhuși-605100, str. Vâloagă nr.3, jud. Bacău Nr. Autoriz. funcț.: 102/01. 09. 2010 ; C.I.F. 4187271
Certificat I.S.O. 9001: Numar certificat 56336/A0001/UK/RO
Tel: 0234-262220 – centrala; Tel/Fax: 0234-261560 – secretariat;
e-mail: spitalbuhusi@gmail.com ; www.spitalbuhusi.ro

Nr. 364 / 12.01.2015

Revizia
Exemplarul

Aprobat,
Manager Dr. Toron Meștereanu



PROTOCOL DE UTILIZARE

ZHIVAHEX

Preparat, ce se utilizează nediluat, pentru dezinfectia rapidă și curățarea suprafețelor obiectelor medicale, instrumentar din spitale, cabinet, laboratoare etc.

Procedura:

Aplicati prin pulverizare pe întreaga suprafață și lăsați să acționeze timp de 5 minute (timp necesar pentru întreg spectrul de activitate, chiar și în condiții de murdărie).

Lichidul în exces se îndepărtează cu un șervețel de unică utilizare.

Se utilizează doar pe materialele compatibile cu alcoolul.

Atentie! Nu se aplică pe suprafețe tratate cu produse pe bază de clor!

Doar pentru uz extern!

Mod de dozare:

Se aplică prin pulverizare o cantitate de aprox. 40-50 ml/mp și se lasă să acționeze timp de 5 minute.

Eficacitate biocida:

Bactericid, tuberculocid, fungicid, virucid (HIV, Hepatita B, Hepatita C, Herpes simplex, Parotitis virus, Parainfluenza virus, Adenovirus, Poliovirus).

Precautii de utilizare:

Compatibilitate cu materialele: aluminiu, oțel inoxidabil, cupru, alama, aluminiu eloxat, crom placat cu alama, polietilena, polipropilena, PVC.

-evitati contactul cu ochii, pielea sau imbracamintea

-purtarea echipamentului de protectie corespunzator: manusi, halat de protectie, ochelari de protectie


-asigurarea unei bune ventilatii a incaperilor

-nu inhalati praful sau vaporii

-deschideti si manipulati cu grija ambalajul

-nu amestecati preparatul cu alte produse

Verificat: Dir.med.Dr. Rotaru Hilda

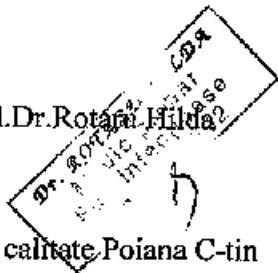

Verificat: Manager calitate Poiana C-tin

CONSTANTIN POIANA
MANAGER
DE CALITATE

Intocmit CPCIN,

Dr.Badita Iulia

As.Pelin Camelia

